

1



A



Contenedor secundari per tubs de sang i orina. Capacitat fins a 100-120 tubs

B



Contenedor secundari per pots de femta, escovillons, MIFs, sangs en femta, etc.

Les neveres UN3373 porten un codi de barres amb identificació única per tenir un control informàtic de la seva sortida i arribada, una sonda de temperatura per ruta i 4 contenidors secundaris isotèrmics extraïbles on posar les mostres: 3 tipus A i 1 de tipus B.

Veure quadres A i B.

2

Col·locar els tres recipients tipus A **estiguin plens o buits** per tal d'assegurar que no es mouen els tubs durant el transport.




3

Dipositar l'acumulador de fred sobre els contenidors tipus A.



4

Posar el contenidor tipus B sobre l'acumulador de fred.

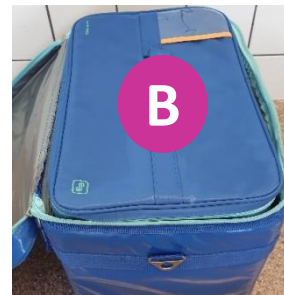

5

Tancar la nevera amb una brida a la cremallera.



6

Registre d'entrega de la nevera mitjançant PDA del transportista.

